


製品紹介

용법

1. 먼저 치아 삭제를 한다.
2. 웨이드 가이드로 치아 색상을 선택한다.
3. Cavity가 깊을 경우엔 Base를 해준다.
4. Bonding을 발라준 다음 라이트를 20초간비추어 준다.
5. 에칭 소루손으로 에나멜층을 에칭 시킨다.
6. 1분후 물로 씻어주고 드라이 시킨다.
7. 다시 본딩을 해주고 난다음 어썬트먼트로 필링을 해준다.
8. 만족하실 만큼 완전히 필링 하신다음 셀룰로이드 스트립을 대주고 라이트를 비추어 준다. (매20초 마다 부자가 올린다) (웨이드 비, 유, 지는 20초, 비오, 지오, 유오는 40초간 비추어 준다.)

Kulzer :
韓國總代理店

RITTER ESCORT UNIT & ELITE CHAIR COMPLETE

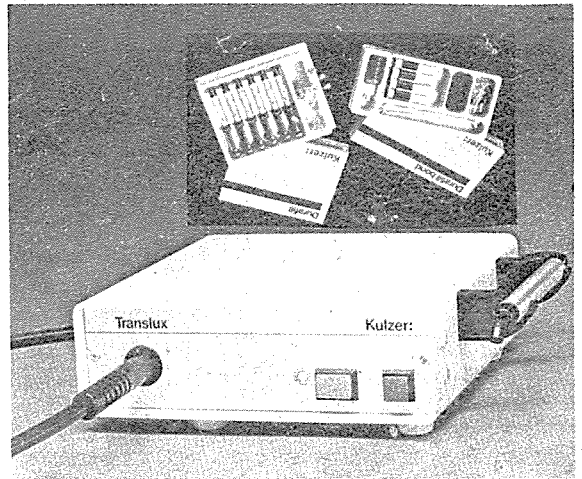

株式會社 恒 星 洋 行

서울特別市中區南大門路5街63-13
☎ (23) 6014 · (22) 7520

MICRO 10

10가지 특징

1. Micro 10을 사용하면 일시에 根管治療用器具, 바-기타 Instrument 치과에서 사용하는 기구를 동시에 소독할수 있다.
2. Micro 10은 먼지나 오물만을 깨끗이 제거하고 인스트루먼트원색 그대로 색채가 남는다.
3. Micro 10을 사용하면 녹이 쓰지않도록 되어있다.
4. Micro 10은 내 부식성 물질로 되어 있다.
5. 高濃度로 되어 있으므로 少量으로도 효과가 크며 경제적이다.
6. Micro 10은 1年分 포장으로 베이커와 같이供給되는 것도 있다.
7. Micro 10은 치과외료를 現代化시켜 4 가지의 약품을 사용하는 대신 1 가지의 농축 약품으로 처리할 수 있게 한다.
8. Micro 10은 여러大學의 衛生檢査機關 및 研究所의 實驗을 마친 제품이다.
9. Micro 10은 용해가 빠르며 비이커에 물을 부어 저으면 즉시 사용할수 있다.
10. Micro 10을 Micro 12와 併用하면 超音波 세척을 完全無欠하게 할수 있다.



※ 스위스 UNIDENT S. A. 社의 製品인 Micro 10의 가장 큰 특징은 防鏽效果에 있으며 機器의品質을 손상시키지 않고 洗淨할수 있으므로 安心하고 使用할수 있다.

超音波 洗淨器인 바이브라 클렌등과 併用할 수 있으며 특히 歐美지역에서는 防鏽消毒藥으로서도 사용되고 있다.



協和大業株式會社
HYUP WHA DAEUP CO., LTD.
C. P. O. BOX 4599
TEL. 28-0150-778-9498