


치아의 회전이동 (rotation of a single tooth)

치아의 회전이동은 같은힘이 서로 다른 평면에서 반대방향으로 작동되어서 쌍 (couple)을 이룰때 가장 잘 일어날 수 있다.

또한 회전된 치아를 치료할때에는 과잉회전 (overrotation) 및 장기간의 보정 (retention)을 하여야만 재발 (relapse)을 막을 수 있다.


[제 작]

- Spring : 0.5mm stainless steel wire
- Labial bow : 0.8mm stainless steel wire
- Retention : Adams clasps on 6 6
- Baseplate : Full plate, cutaway around involved tooth.

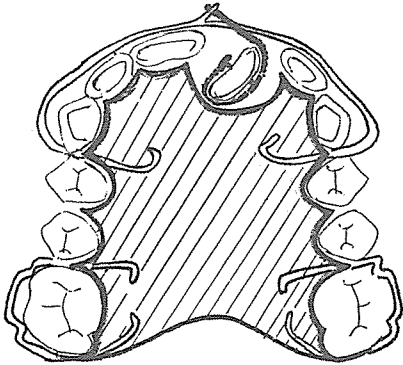


[그림 1]

회전된 상악좌측 중절치의 순, 설면에 직접법적에 의해서 D. B. S. button을 부착시킨후 labial bow에 납착 (solder)시킨 spur와 button사이에 Elastic 을 걸어주어서 중절치의 회전운동을 시도하는 모습.

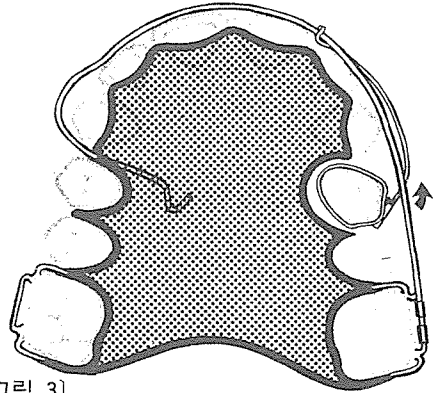

[그림 3]

회전된 제 1 소구치에 대환을 장착하고 spring 을 labial bow에 걸어서 소구치의 회전운동을 시키는 모습.

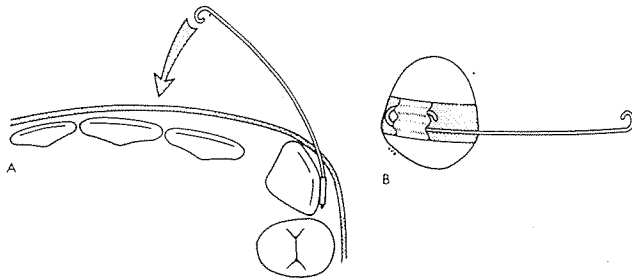

[그림 2]

회전된 견치에 대환 (band)을 장착하고 spring 을 이용하여 견치의 회전운동을 시키는 모습.

# 신일치과기공소

代表 孫 永 受

서울 · 중구 만리동 1가 62-18  
☎ 312-7869 · 393-2032